

機械器具（74）医薬品注入器

一般医療機器 一般的名称：浣腸用キット JMDN コード：11582000


CBD エネマ（腸内洗浄 S e t）

【禁忌・禁止】

- ・お湯は38℃以上の温度で使用しないこと。必ず、温度計、指などで確認すること。
- ・妊娠中や妊娠の可能性のある方は使用しないこと。
- ・小児には使用しないこと。
- ・静脈瘤のある方、痔の方は使用しないこと。
- ・食後1時間は使用を避けること。
- ・本品を使用して異常を感じた場合は、使用を中止し医師の診断を受けること。
- ・お湯の代わりに他の飲み物等で使用しないこと。
- ・お湯に他の飲み物や粉体等を加えて使用しないこと。
- ・使用は、一日一回を目途とすること。
- ・洗浄液は飲まないこと。

【形状・構造及び原理】

1. 外観

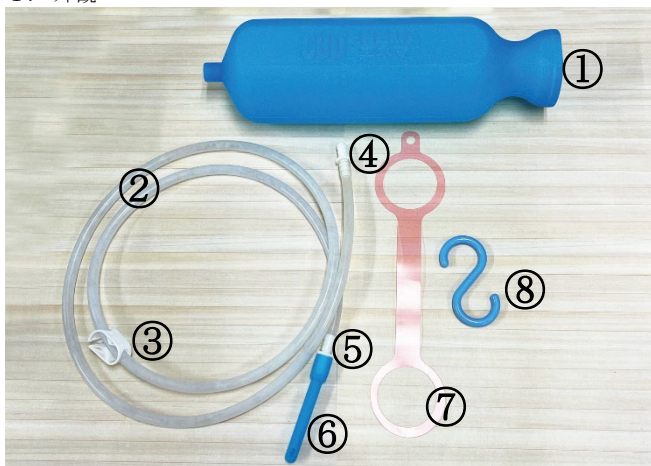

- ①ボトル本体、②チューブ（ホース）、③液止めクランプ、
④ジョイント、⑤ジョイント、⑥エネマノズル、
⑦吊り下げバンド（ボトル取っ手）、⑧S字フック

2. 原理

ボトル本体に入れた洗浄液などを、重力を利用してチューブ、エネマノズルを経て直腸内に注入する。

【使用目的又は効果】

洗浄液を直腸に注入するために用いる用具を集めたパッケージで、大腸の排便を促進する。

【使用方法等】

1. 使用準備

- ①ボトル本体にチューブ（ホース）に接続されているジョイントを取り付ける。
- ②液止めクランプを閉める。
- ③ボトル本体のくびれ部分に吊り下げバンドの輪の部分をはかける、S字フックを取り付け、シャワーフックやカーテンレール等を利用して170～180cm程度の高さに吊るす。チューブ（ホース）に空気が入っている場合は、あらかじめお湯を少し流して空気を抜いておくこと。
- ④お湯（36～38℃）900ml に対し洗浄液*100ml をボトル本体に入れる。

*推奨洗浄液：CBD 洗浄液（販売名：超快腸 CBD エネマ
販売元：多摩岡産業株式会社）

2. 使用方法

- ①エネマノズルを先端から3～4cm程度肛門に挿入し、液止めクランプを外す。立ったまま、便座に座ったまま・ひざをついた姿勢など、自分にあった姿勢で行うこと。エネマノズルが動かないように手で持っていること。
- ②1分程度で洗浄液が腸内に入る（ホースには少し残る）ので、終わったら液止めクランプを留めて、エネマノズルを抜く。
- ③洗浄液の注入が終わったら、お腹のマッサージを行う。時計回りにマッサージする、指で強めに押す、揺さぶる、深呼吸しながらマッサージするなどいろいろ試すこと。
- ④便意をもよおしたら、リラックスして排便すること。排便が終わるまでマッサージを続けると効果的である。

3. 使用後

使用後は、ボトル本体とチューブ（ホース）に残った液体を捨て、お湯で洗い流す。エネマノズルはホースから外し、お湯に中性洗剤を入れてよく洗い、ボトル本体、チューブ（ホース）と一緒によく乾燥させること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ①お湯は38℃以上の温度で使用しないこと。必ず、温度計、指などで確認すること。
- ②妊娠中や妊娠の可能性のある方は使用しないこと。
- ③小児には使用しないこと。
- ④自分自身で操作して用すること
- ⑤静脈瘤のある方、痔の方は使用しないこと。
- ⑥食後1時間は使用を避けること。
- ⑦本品を使用して異常を感じた場合は、使用を中止し医師の診断を受けること。
- ⑧排泄がスムーズに行かなかったときは、2、3日あけてから使用すること。
- ⑨お湯と洗浄液をボトル本体に入れる際には必ず液止めクランプが留まっていることを確認すること。
- ⑩使用は、一日一回を目途とすること。
- ⑪洗浄液は飲まないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及等】

製造販売業者・製造業者
多摩岡産業株式会社
電話：042-361-0558